



جدول نگهدارنده های ادرار 24 ساعته (خلاصه)

مقدار ماده نگهدارنده	آزمایشات	ماده نگهدارنده	ردیف
12/5 اسید+12/5 اب مقطر=25سی سی به ظرف ادرار	متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/الدوسترون، آلفا یک میکروگلوبولین، کورتیزول، پروستاگلاندین، لکوترین، سروتونین، هومووانیلیک اسید. سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/ جیوه، نیکل، نیتروژن، تالیوم، کادمیوم، کلر، ید، روی، سرب، آرسنیک، مس، فلزات سنگین.	اسید استیک	1
10 گرم به ظرف ادرار	متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/الدوسترون، آلفا یک میکروگلوبولین، کورتیزول، پروستاگلاندین، لکوترین، سیترات، سولفات، اسید اوریک، پروتئین، رتینول متصل به پروتئین. سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/ کلر.	اسید بوریک	2
15 اسید + 15 اب مقطر=30 سی سی به ظرف ادرار	متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/هومووانیلیک اسید. سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/ جیوه، نیتروژن، تالیوم، کادمیوم، سرب، آرسنیک، مس، الومینیوم، فلزات سنگین.	اسید کلریدریک	3

تست هایی که با اسید استیک و اسید بوریک قابل انجام هستند

متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/

تست هایی که با اسید بوریک و اسید کلریدریک قابل انجام هستند

متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/

تست هایی که با اسید استیک و اسید کلریدریک قابل انجام هستند

متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/هومووانیلیک اسید.
سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/ جیوه، نیتروژن، تالیوم، کادمیوم، آرسنیک، مس، سرب، فلزات سنگین.

تست هایی که با اسید استیک و اسید بوریک و اسید کلریدریک قابل انجام هستند

متانفرین، کاتکولامین، هیدروکسی اندول استیک اسید، VMA، گلوکز، اوره، کراتینین/سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم/

تست هایی که به هیچکدام از افزودنی ها نیاز ندارند

آمونیم، آریل سولفاتاز، آگزالات، الکتروفورز پروتئین، ایمنوفیکسیشن، ایمنوگلوبولین، کرومیوم، کبالت، سیستین، منگنز، پورفیرین، PH.